



## Anwendung

### Gesicht

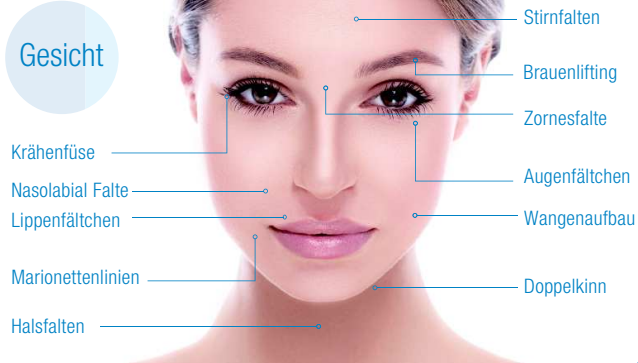

### Körper

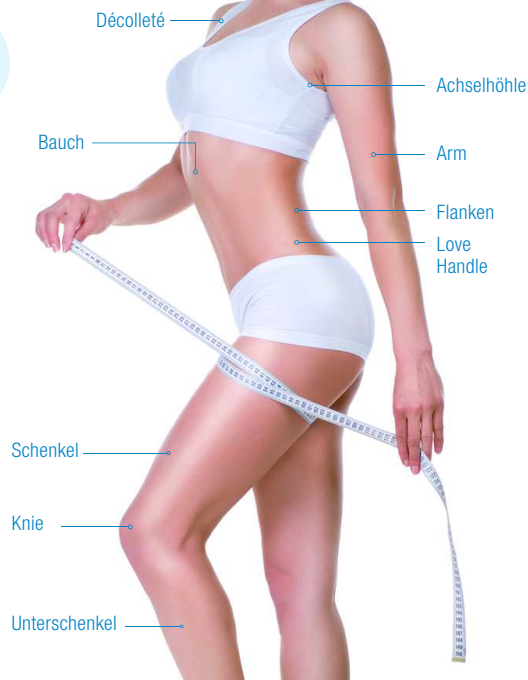

## Klinische Fälle

Ausgangslage nach Behandlung



vorher

nachher



vorher

3 Monate später



vorher

Soforteffekt

# ULTRAFORMER® III



## Reform Your Youth


Nicht-chirurgisches System  
für Lifting, Straffung &  
Formung für Gesicht und Körper

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere  
Patienten-Webseite [www.ultraformer.com](http://www.ultraformer.com)

LM 2018-201



## Gesicht

Abhängig von der Hautbeschaffenheit (oberflächliche muskuläre aponeurotische Schichten SMAS) wird die fokussierte Ultraschall-Energie in Tiefen von 1.5, 2.0, 3.0 oder 4.5 mm eingebracht. Ultraschnell und ultrapräzise. So wird die Kollagenerneuerung stimuliert, was wiederum zur Hautstraffung führt. Die Energie wird von sogenannten mikro-fokussierten Transducern mit hohen Ultraschall-Frequenzen erzeugt.

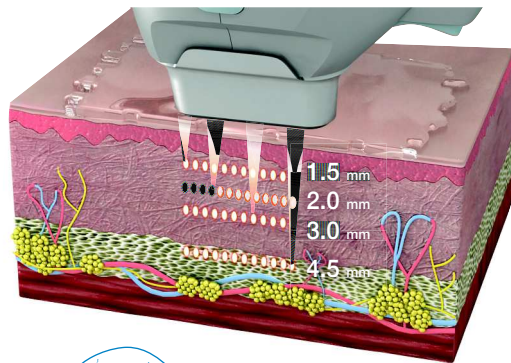

## Körper

Die tieferen Ultraschall-Frequenzen werden mittels sogenannten makrofokussierten Transducern in Tiefen von 6.0 oder 9.0 mm des subkutanen Gewebes appliziert, wo in den Fettzellen Kontraktionen erzeugt werden. Diese Fettzellen werden dann auf natürlichem Weg ausgeschieden.

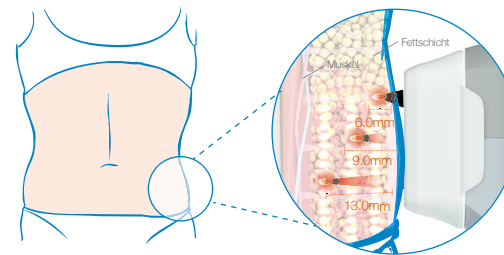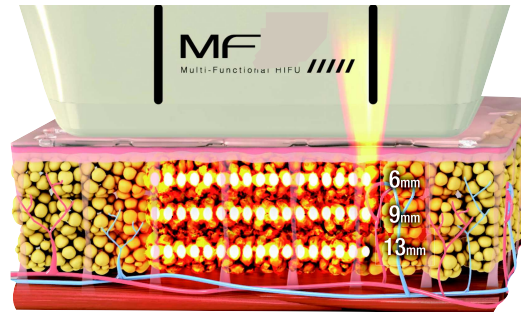

## Häufige Fragen

### Was sind die Vorteile von Ultraformer III?

Der Ultraformer III nutzt Transducer, die sich auf mehrere Tiefen der Haut konzentrieren, um das Gesicht zu liften und zu straffen sowie um Körpergewebe für Konturzwecke zu straffen. Der Patient kann massgeschneiderte Behandlungen an Gesicht und Körper erhalten mit der stabilen Abgabe von Ultraschallenergie, schneller Anwendung und präziser Genauigkeit von MMFU-angetriebenen Wandlern.

### Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?

Gute Ergebnisse für das Gesichtslifting und -straffung und Verbesserung der Körperkontur können in den 3 Monaten nach der Behandlung erwartet werden. Nichtsdestotrotz, Patienten können für ein paar Stunden eine leichte Rötung sowie Schwellung oder Kribbeln in den Behandlungsbereichen bis zu ein paar Wochen empfinden. Es kann auch zu leichten Blutergüssen und zu Taubheit auf den behandelten Gebieten kommen, die jedoch nicht länger als 2-4 Wochen nach der Behandlung anhalten.

### Ist die Behandlung schmerzhaft?

Bei der Entwicklung des Ultraformer III wurde auf eine angenehme Behandlung und hohe Wirksamkeit geachtet. Patienten und Anwender berichten, dass der Ultraformer III im Vergleich zu anderen Geräten nur minimale Schmerzen mit nur leichtem Unbehagen an Gesicht oder Körper verursacht. Die Empfindungen sollten unmittelbar nach der Behandlung sofort nachlassen.


### Bin ich für eine Behandlung geeignet?

Patienten mit vielfältigen Hautbefunden wie feine Linien, Falten und Hyperpigmentierung im Gesicht oder hartnäckigem Bauchfett und ‚Love-handles‘ sind ideale Kandidaten für eine Behandlung mit dem Ultraformer III. Anwender können mit einer Vielzahl verschiedener Transducern sowohl Gesicht als auch die Körperkontur behandeln.


## Neokollagenese

MMFU bedeutet ‚Micro and Macro focused Ultrasound‘. Die Erzeugung von ca. 65,4° C in den Zielschichten führt zu natürlichen Koagulations- und Wundheilungsprozessen, die die Erneuerung des Kollagens unterhalb der Epidermis stimuliert.

### Entzündungs-Phase

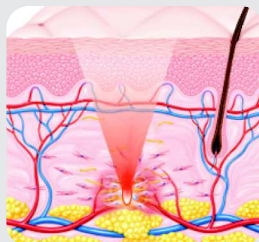

### Proliferative Phase

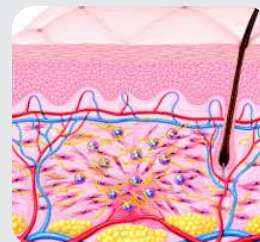

### Umgestaltungs-Phase



## Vorteile

- Kombination Micro & Macro
- keine Downtime & nicht-invasiv
- Transducer verschiedener Tiefen
- Gesicht & Körper Anwendung
- Schnell und angenehm
- Massgeschneidert pro Patient